



Fabricant d'articles de contention médicale

Marcoux Lafay SAS - Avenue du Champ de Foire, 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
www.marcoux-lafay.com 33 (0) 4 77 97 75 00
Votre contact : Jean-Pierre Marcoux

Masque Barrière **EXPERT** UNS Type 1 Réf. 52610

**LE masque
au dessus
des normes**

Filtration à 3 μ : 99.3 %
Respirabilité : 132 l/m²/s
> Mesures DGA



- **Tricotage 3D** 100% ergonomique
 - **Sans couture**, ne laisse pas de marque
 - Avec **barette nasale** pour un ajustement optimum
 - Polyamide microfibre, **ultra doux** au contact
 - **Garanti** lavable **10x** (et jusqu'à 40 lavages)
 - Hypoallergénique
 - Normalisé UNS^(*) **Barrière Type 1** destiné grand public
- (*) Usage Non Sanitaire



Bravo !

En protégeant nos vies,
nous protégeons nos emplois.

Fabrication 100% Française



Fabricant d'articles de contention médicale

Marcoux Lafay SAS - Avenue du Champ de Foire, 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
www.marcoux-lafay.com 33 (0) 4 77 97 75 00
Votre contact : Jean-Pierre Marcoux

Masque Barrière
EXPERT UNS Type 1
Réf. 52610

FICHE TECHNIQUE



Enregistrement IFTH	2020-04-10-005
Categorie UNS	Catégorie 1
Coloris	blanc
Composition	polyamide 90.5 % Élasthanne 9.50 %
Confection	tricot 3D
Lavable	garanti 10x (et jusqu'à 40x)
Température de lavage	60°C ~ 70°C / minimum 30 min
Filtration à 3 µ	99,3%
Filtration à 1 µ	97,0%
Respirabilité	132 l/m²/s
Port	4h MAX. en continu
Hypoallergénique	oui
Conditionnement	sachet de 20
Unité de vente	boîte de 160



Fabricant d'articles de contention médicale

Marcoux Lafay SAS - Avenue du Champ de Foire, 42130 Sainte-Agathe-la-Bouteresse
www.marcoux-lafay.com 33 (0) 4 77 97 75 00

Votre contact : Jean-Pierre Marcoux

Masque Barrière **EXPERT** UNS Type 1 Réf. 52610

Notice d'utilisation




> Instructions de lavage

ATTENTION : ENLEVER LA BARRETTE NASALE À CHAQUE LAVAGE.

Ce masque **doit être lavé avant utilisation.**

Laver à 60°, cycle court (minimum 30 min), essorage fort (entre 1200 et 1400tr/min) avec une lessive classique avant la première utilisation et après chaque utilisation (dès qu'il est retiré ou bien au bout de **4h d'utilisation continue** au maximum).

Séchage au sèche-linge.
Sans sèche-linge : séchage à plat ou suspendu.

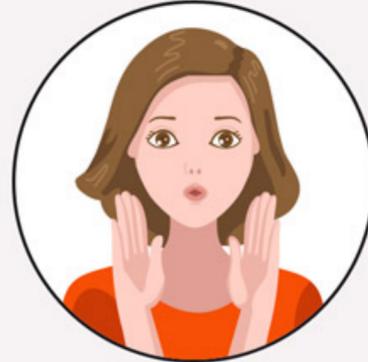

Se laver les mains ou se frictionner avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.



Insérer la barrette nasale dans le logement située sur la partie haute du masque.



Ajuster le cordon à la longueur voulue. Faire un noeud et si nécessaire, le faire coulisser dans la gaine.



Pincer la barrette et l'ajuster aux contours du nez.



Mettre en place le masque en l'accrochant autour des oreilles



Positionner le masque en l'ajustant sur une zone couvrant le bas du menton jusqu'à l'arrêt du nez.